

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):

- Беременные
- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать простой губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?

Это может зависеть от кожи и тяжести заболевания, но обычно для достижения хорошего результата требуется от 4 до 6 сеансов. После этого пациенту может потребоваться поддерживающая терапия каждые несколько месяцев в зависимости от типа кожи.

КАКОВ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ?

Пациент должен проходить 1 процедуру каждые одну-две недели.

КАКОВО ИДЕАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ МАНИПУЛЯТОРА С ОБЪЕКТИВОМ 6 ММ ДО КОЖИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АКНЕ? С ЛИНЗОЙ 2 ММ?

Для объектива 6 мм расстояние, на самом деле, не имеет значения, так как этот объектив обеспечивает т.н. коллимированный пучок. Мы рекомендуем работать на расстоянии от 1 до 3 дюймов с линзой 6 мм, чтобы расположить ее

достаточно близко для простоты прицеливания, но достаточно далеко от кожи, чтобы манипулятор визуально не заслонял цель. Хотя расстояние не влияет на энергию, излучаемую на предлагаемом расстоянии, размер «пилотного» светового пятна более соответствует размеру пятна лазерного излучения. (Продолжение на следующей странице).

ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

Пациентов необходимо проинформировать, что при лечении акне обычно требуется до 6 процедур, чтобы увидеть хороший результат. Акне возникает, когда поры засоряются и затем заражаются пропионовыми бактериями акне (*Propionibacterium acnes*). Это не всегда вызвано плохим питанием или гигиеной, но изменение каждого из этих факторов может помочь добиться лучших результатов. Лазерное излучение избирательно повышает температуру пораженную область для эффективного разрушения пропионовых бактерий, а также способствует уменьшению сальных желез, что заставляет их вырабатывать меньше жира, ограничивает будущие обострения и уменьшает размер пор. Кроме того, состояние некоторых пациентов может ухудшиться, прежде чем появятся улучшения. Улучшения будут наблюдаться по мере проведения лечения. Пациент должен знать об этом риске и распространенных явлениях, в противном случае он может отказаться от дальнейших процедур. Лекарства от акне нет, только поддерживающая терапия, поэтому пациент должен знать, что в будущем ему может потребоваться больше процедур.

НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНУЮ АНЕСТЕЗИЮ? А ГЕЛИ?

Нет. Анестетики и охлаждающие гели не нужны при использовании Aerolase Neo, поскольку микроимпульсная технология формирования лазерного импульса с длиной волны 1064 нм обеспечивает уникальную безболезненность. Однако при использовании пятна размером 2 мм будет ощущаться некоторое накопление тепла и может ощущаться легкое пощипывание. Данное уникальное преимущество экономит время, затраты и устраняет хлопоты, связанные с гелями и спреями, необходимыми для других лазеров, которые охлаждают кожу во время лечения.

При использовании объектива 2 мм дистанционный указатели слегка касаться кожи, не оказывая слишком большого давления на кожу пациента. Это лучший способ гарантировать, что подается выдержанно правильное расстояние до кожи, поскольку работа фокусного объектива 2 мм зависит от этого расстояния.

КОГДА Я МОГУ УВИДЕТЬ УЛУЧШЕНИЕ МОЕГО СОСТОЯНИЯ?

Количество процедур, а также результаты различаются для каждого пациента. Обычно улучшение может быть заметно через 4-8 недель, если процедуры проводятся каждые 1-2 недели в зависимости от тяжести состояния и реакции кожи пациента на терапию. Состояние некоторых пациентов может ухудшиться, прежде чем появятся улучшения.

КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АКНЕ?

При лечении акне Aerolase Neo использует размеры пятна 6 мм и 2 мм. Колимированный объектив с диаметром рабочего пятна 6 мм используется для обработки всей пораженной области с целью эффективного нагрева сальных желез и уничтожения пропионовых бактерий акне на всех типах кожи. Фокусный объектив с диаметром рабочего пятна 2 мм используется на фототипах кожи от I до III для воздействия на каждое видимое поражение. Количество импульсов зависит от размера поражения, обеспечивая эффективное разрушение активных бактерий и уменьшая покраснение пораженного участка. Объектив 6 мм используется на типах кожи IV-VI для воздействия на каждое видимое поражение. Количество импульсов зависит от размера поражения.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ? ЭТО БОЛЬНО?

Нет, есть только легкое и очень терпимое ощущение тепла. Это одно из ключевых технических достижений технологии Aerolase. Aerolase Neo установил новый стандарт практически безболезненного лечения акне, включая лечение на темных типах кожи благодаря технологии MicroPulse-1064.

ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ МОИ АКНЕ ВЕРНУТСЯ?

Лекарства от акне нет, только поддерживающая терапия, поэтому в будущем может потребоваться дальнейшее лечение. Эффект будет отличаться для каждого пациента, и у некоторых пациентов будут лучшие результаты по сравнению с другими, в зависимости от степени тяжести акне, типа кожи и ежедневного ухода.

Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли при лазерном лечении акне для более темных типов кожи или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая, по существу, устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентам с типами кожи IV-VI не следует проводить лечение на лице с применением высокой мощности и использованием линзы 2 мм, так как риск гипер- и/или гипопигментации увеличивается.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА РУБЦАХ ОТ АКНЕ?

Да, Aerolase Neo удалит пигмент и покраснение с рубцов от акне. Лазер также немного улучшит текстуру кожи, что восстановит коллаген и эластин.

Если вы хотите существенно улучшить состояние кожи, на которой имеются проявления постакне (рубцы, оспины и т.д.) мы настоятельно рекомендуем пройти абляционную процедуру с использованием Aerolase Era.