

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):

- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

#### СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?

Индивидуальные результаты будут различаться, но могут зависеть от размера пораженной поверхности. Обычно требуется 5 или более процедур, хотя некоторые пациенты могут увидеть результаты и раньше.

#### ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПСОРИАЗ?

Псориаз – хроническое заболевание, которое вызывает появление на коже утолщенных красных бляшек с серебристыми чешуйками. Шелушение бляшек обусловлено быстрым размножением клеток кожи. Ваш организм вырабатывает некоторые иммунные реакции, могущие привести к разрастанию и быстрому производству клеток кожи. Симптомы псориаза имеют тенденцию усиливаться и ослабевать, но некоторые факторы могут вызывать обострения, включая, помимо прочего, алкоголь, стресс, прием лекарств, курение и травмы кожи.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

Некоторые пациенты могут реагировать не так, как другие. Состояние пораженных псориазом участков имеет тенденцию улучшаться после первого или последующих сеансов лечения. Независимо от реакции на лечение, рецидивы случаются часто и могут быть вызваны рядом факторов образа жизни. Важно понимать, что псориаз – это хроническое заболевание, которое можно только контролировать, а не вылечить.

#### НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНУЮ АНЕСТЕЗИЮ? А ГЕЛИ?

Нет. Анестетики и охлаждающие гели не нужны при использовании Aerolase Neo, поскольку микроимпульсная технология формирования лазерного импульса с длиной волны 1064 нм обеспечивает ему уникальную безболезненность. Однако некоторое накопление тепла будет ощущаться, особенно при использовании более высоких плотностей потока с объективом 2 мм.

#### ЭТО БОЛЬНО?

Возникает легкое ощущение тепла, которое вполне терпимо. При использовании более высоких значений плотности потока с объективом 2 мм может возникнуть легкое пощипывание. Это одно из ключевых технических достижений технологии Aerolase!

Aerolase Neo установил новый стандарт практически безболезненного лечения, даже на более темных типах кожи, благодаря технологии MicroPulse-1064. Данное уникальное преимущество экономит время, затраты и устраняет хлопоты, связанные с гелями и спреями, необходимыми для других лазеров, которые охлаждаю кожу во время лечения.

#### МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ ИМПУЛЬСЫ НА ОДНУ И ТУ ЖЕ ОБЛАСТЬ?

Обычно следует выполнять 3–4 прохода на каждом псориазическом очаге для обеспечения максимальной эффективности лечения.

## КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА?

Aerolase Neo обычно использует более высокую плотность потока с объективом 5 мм для разрушения микроциркуляторного русла, питающего очаги поражения кожи. При использовании размера пятна 5 мм дистанционные стержни должны слегка касаться кожи, не оказывая давления.

## МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ?

Дерматолог должен сначала осмотреть выпуклые пигментные пятна перед началом любого вида лечения. Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли для более темных типов кожи или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая по существу устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентов с типами кожи IV-VI следует лечить очень осторожно, особенно в области лица, так как для них присутствует повышенный риск гипер- и/или гипопигментации.

## ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР?

Сразу после процедур может появиться транзиторная эритема в обработанной области или рядом с ней, которая должна пройти в течение нескольких дней. Может потребоваться до 6 недель для возврата пораженных участков кожи к нормальной толщине, но для улучшения состояния покраснения может потребоваться до нескольких месяцев. Для обеспечения постоянного улучшения состояния при обострениях обычно планируются сеансы поддерживающей терапии.

## ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ ПСОРИАЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Псориаз обычно характеризуется периодами роста и спада, когда симптомы усиливаются или уменьшаются. Хотя псориаз неизлечим, его можно контролировать с помощью лазерного излучения для сохранения вашей функциональности и уменьшения покраснения. Состояние пораженных псориазом участков может улучшиться в результате лечения и даже исчезнуть на несколько месяцев, но он не может полностью исчезнуть.