

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):**

- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

#### **СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?**

Рекомендуется провести пациенту 3-4 процедуры. Как правило, чем больше пигмента или сосудистой сети содержит рубец, тем больше сеансов лечения может потребоваться. Хотя может наблюдаться заметное улучшение уже после одной процедуры, для достижения достаточного уровня обесцвечивания может потребоваться несколько сеансов лечения.

#### **КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ?**

Одну процедуру следует проводить каждые 3-4 недели.

#### **МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ ИМПУЛЬСЫ НА ОДНУ И ТУ ЖЕ ОБЛАСТЬ?**

Обычно рекомендуется проводить несколько проходов на пораженной области для достаточного нагрева источника пигментации в целях обесцвечивания и улучшения текстуры кожи.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ**

Некоторые пациенты могут реагировать не так, как другие. Как правило, новые рубцы реагируют на лечение лучше, чем застарелые, из-за повышенной васкуляризации или меланина, присутствующего в рубце. Хотя процесс ремоделирования коллагена будет обеспечивать улучшение текстуры кожи, важно сообщить пациенту, что лазерная терапия уменьшит содержание меланина или сосудистой сети в рубце, но не удалит рубец полностью, поскольку для уменьшения рубцовой ткани необходим абляционный лазер, такой как Aerolase Era.

#### **НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНУЮ АНЕСТЕЗИЮ? А ГЕЛИ?**

Нет. Анестетики и охлаждающие гели не нужны при использовании Neo Elite, поскольку микроимпульсная технология формирования лазерного импульса с длиной волны 1064 нм обеспечивает ему уникальную безболезненность. Однако некоторое накопление тепла будет ощущаться, особенно при использовании более высоких плотностей потока с линзой 2 мм.

#### **ЭТО БОЛЬНО?**

Возникает легкое ощущение тепла, которое вполне терпимо. При использовании более высоких значений плотности потока с объектива 2 мм может возникнуть легкое пощипывание. Это одно из ключевых технических достижений технологии Aerolase!

Aerolase Neo установил новый стандарт практически безболезненного лечения даже на более темных типах кожи благодаря технологии MicroPulse-1064. Данное уникальное преимущество экономит время, затраты и устраняет хлопоты, связанные с гелями и спреями, необходимыми для других лазеров, которые охлаждают кожу во время лечения.

#### **КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РУБЦОВ?**

Neo обычно использует комбинацию более низких и более высоких значений плотности потока с объективами 6 мм и 5 мм. Обычно для более светлых пятен требуется большая мощность, а для удаления более темных пятен требуется бо-

лее низкая плотность потока. Манипулятор не должен касаться кожи при использовании размера пятна 6 мм, но при использовании размера пятна 5 мм дистанционные стержни должны слегка касаться кожи, не оказывая давления. Рекомендуется использовать только объектив 6 мм для типов кожи IV-VI.

### **МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ?**

На самом деле Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли для более темных типов кожи или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая по существу устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентов с типами кожи IV-VI следует лечить очень осторожно, особенно в области лица, так как для них присутствует повышенный риск гипер- и/или гипопигментации.

### **ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР?**

Вы можете вернуться к своей обычной деятельности сразу после процедур и заметить улучшение в течение следующих 3-4 недель, но, как правило, результаты будут видны после 2-3 сеансов. Если никаких изменений не произойдет, на следующем сеансе лечения необходимо будет использовать более высокую плотность потока для более выраженного улучшения.