

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):

- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?

Это может зависеть от кожи и тяжести заболевания, но обычно для достижения хорошего результата требуется 6 сеансов. После этого пациенту может потребоваться поддерживающая терапия каждые несколько месяцев в зависимости от типа кожи.

КАКОВО ИДЕАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ МАНИПУЛЯТОРА С ОБЪЕКТИВОМ 6 ММ ДО КОЖИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ? С ОБЪЕКТИВОМ 2 ММ?

Расстояние на самом деле не имеет значения, так как объектив 6 мм имеет коллимированный пучок диаметр которого не зависит от расстояния. Мы рекомендуем работать на расстоянии от 1 до 3 дюймов с объективом 6 мм, чтобы расположить ее достаточно близко для простоты прицеливания, но достаточно далеко от кожи, чтобы манипулятор визуально не заслонял цель. Хотя расстояние не влияет на энергию, излучаемую на предлагаемом расстоянии, размер

светового пятна «пилота» соответствует размеру пятна.

При использовании объектива 2 мм дистанционные стержни должны слегка касаться кожи, не оказывая слишком большого давления на кожу пациента. Это лучший способ гарантировать, что подается соответствующее излучение, поскольку правильная работа фокусного объектива 2 мм зависит от расстояния.

ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

Лучшими кандидатами на омоложение кожи являются пациенты, у которых проявляются начальные признаки старения, такие как мелкие складки, неглубокие морщины, повреждения от солнца и сосуды, а также признаки снижения эластичности кожи. Пациенты могут увидеть результаты сразу после процедур, и со временем результаты будут продолжать улучшаться. После полного курса лечения (обычно один раз в месяц в течение 6 месяцев) пациенты могут ожидать, что результаты будут сохраняться в течение следующих шести месяцев, после чего они могут снова начать процедуры.

НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНУЮ АНЕСТЕЗИЮ? А ГЕЛИ?

Нет. Анестетики и охлаждающие гели не нужны при использовании Neo Elite, поскольку микроимпульсная технология формирования лазерного импульса с длиной волны 1064 нм обеспечивает ему уникальную безболезненность. Однако при использовании пятна размером 2 мм будет ощущаться некоторое накопление тепла и может ощущаться легкое пощипывание. Данное уникальное преимущество экономит время, затраты и устраняет хлопоты, связанные с гелями и спреями, необходимыми для других лазеров, которые охлаждают кожу во время лечения.

ЭТО БОЛЬНО?

Нет, есть только легкое и очень терпимое ощущение тепла. Это одно из ключевых технических достижений технологии Aerolase. Neo установил новый стандарт практически безболезненного лечения даже на более темных типах кожи благодаря технологии MicroPulse-1064.

КОГДА Я МОГУ УВИДЕТЬ УЛУЧШЕНИЕ МОЕГО СОСТОЯНИЯ?

Пациенты могут заметить сияние или ощущение подтянутости сразу после первой процедуры. Некоторые пациенты также могут заметить уменьшение размера пор через несколько недель после первой процедуры. Обычно требуется 1 сеанс каждый месяц в течение 6 месяцев. Пациенты должны заметить значительные результаты после завершения всего курса процедур. Пациенты могут увидеть дополнительные улучшения в течение 6 месяцев после процедуры из-за постоянного роста нового коллагена и эластина.

КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ?

Aerolase Neo использует размеры пятен 6 мм, 5 мм и 2 мм для омоложения кожи. Объектив 6 мм используется на типах кожи I-VI для охвата всей области с целью эффективного нагрева воды, находящейся в слое дермы. Объектив 5 мм используется там, где кожа толще (таких как шея и линия подбородка). Затем используется объектив 2 мм для обработки любых красных или коричневых пятен в целях завершения процедуры. Мы рекомендуем использовать объективы 2 мм и 5 мм только на типах кожи I-III.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ?

На самом деле Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли для более темных типов кожи или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая по существу устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентам с типами кожи IV-VI не следует проводить лечение на лице с применением высокой мощности и использованием объектива 2 мм, так как риск гипер- и/или гипопигментации увеличивается.

ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ ПЯТНА И ДРЯБЛОСТЬ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

Ваша кожа будет выглядеть более упругой, более подтянутой, а красные и коричневые пятна уменьшатся; но кожа продолжит стареть, поэтому в будущем могут потребоваться поддерживающие процедуры. Для уменьшения признаков старения важно наносить солнцезащитный крем, который замедлит появление морщин и повреждения от солнца.