

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):**

- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

#### **СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?**

Это может зависеть от размера и цвета сосуда. Обычно ангиомы и сосудистые звездочки полностью исчезают после 1–2 процедур, хотя в некоторых случаях может потребоваться больше процедур.

#### **МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ ИМПУЛЬСЫ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ СОСУДЫ?**

При предварительном нагревании сосуда вы можете выполнить 3 прохода. Однако при точечной обработке каждого отдельного сосуда с помощью фокусного объектива 2 мм или 5 мм важно выполнить только один проход, независимо от того, видны ли изменения или нет (из-за повышенного риска образования рубцов).

#### **КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ?**

Рекомендуется предварительно нагреть каждый

сосуд, выполнив 3 прохода с использованием объектива 6 мм. После этого выполните 1 проход с использованием объектива 2 мм для типов кожи I–III или объектива 5 мм для типов кожи IV–VI.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ**

Некоторые пациенты будут реагировать лучше, чем другие, и количество процедур для каждого сосуда может зависеть от темноты и размера сосуда, а также активности пациента после лечения. Сосуды на ногах имеют более высокую тенденцию к повторному появлению на поверхности, так как артериальное давление в нижних конечностях, как правило, выше. После лечения может появиться красноватое окрашивание прилегающей кожной ткани, вызываемое гемосидерином (из-за распада гемоглобина), которое исчезнет в течение 3–4 недель.

#### **НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНУЮ АНЕСТЕЗИЮ? А ГЕЛИ?**

Нет. Анестетики и охлаждающие гели не нужны при использовании Neo, поскольку микроимпульсная технология формирования лазерного импульса с длиной волны 1064 нм обеспечивает ему уникальную безболезненность. Однако некоторое накопление тепла будет ощущаться, особенно при использовании более высоких плотностей потока с линзой 2 мм.

Обычно для более светлых сосудов требуются более высокие настройки излучения, а для удаления более темных сосудов требуются более низкие настройки излучения. При обработке поражений распорные стержни должны слегка касаться кожи, не оказывая слишком большого давления.

#### **ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ?**

Сосудистые поражения могут образовываться из-за застоя крови по ряду причин, включая старение, воздействие солнца, беременность и гормональные изменения, а также определенные типы травм.

#### **МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ?**

Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли для более темных типов кожи

или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая по существу устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентов с типами кожи IV-VI следует лечить очень осторожно, особенно в области лица, так как для них присутствует повышенный риск гипер- и/или гипопигментации.

### **МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ВЫПУКЛЫХ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТНАХ?**

Дерматолог должен сначала осмотреть выпуклые пигментные пятна перед началом любого вида лечения. Если дерматолог одобрит лечение пациента, вы можете приступить к процедурам.

### **ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР?**

Сосудистое поражение может выглядеть как царапина от кошки в течение 3-4 недель. В конечном итоге оно покрывается коркой и отшелушивается, поэтому важно всегда поддерживать увлажненность в области с помощью Aquaphor для снижения риска образования рубцов.

### **ЭТО БОЛЬНО?**

Возникает легкое ощущение тепла, которое вполне терпимо. При использовании более высоких значений плотности потока с объективом 2 мм может возникнуть легкое пощипывание. Это одно из ключевых технических достижений технологии Aerolase!

Aerolase Neo установил новый стандарт практически безболезненного лечения даже на более темных типах кожи благодаря технологии MicroPulse-1064. Данное уникальное преимущество экономит время, затраты и устраняет хлопоты, связанные с гелями и спреями, необходимыми для других лазеров, которые охлаждают кожу во время лечения.

### **ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ СОСУДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?**

Многие сосуды исчезнут навсегда, но из-за старения кожи, постоянного воздействия солнца и гормональных изменений, скорее всего, со временем появятся новые сосуды, и потребуются провести больше процедур. Чтобы замедлить процесс старения и снизить вероятность появления новых сосудов, пациентам следует всегда наносить солнцезащитный крем, когда они находятся на солнце, и избегать длительного воздействия солнца.