

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):

- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать простой губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?

Это может зависеть от глубины и размера бородавки. Обычно бородавки полностью исчезают после 2-4 процедур, хотя в некоторых случаях может потребоваться больше процедур.

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ?

Одну процедуру следует проводить каждые 1-2 недели.

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОРОДАВОК?

Поскольку существует вероятность попадания вируса в воздух, следует использовать медицинский дымоотсос для удаления любого дыма, который может возникнуть. Также рекомендуются перчатки и маски, защищающие от вирусов.

ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

Некоторые пациенты будут реагировать лучше, чем другие, и количество процедур для каждого сосуда может зависеть от глубины и размера бородавки.

НУЖНО ЛИ МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНУЮ АНЕСТЕЗИЮ? А ГЕЛИ?

Нет. Анестетики и охлаждающие гели не нужны при использовании Neo Elite, поскольку микроимпульсная технология формирования лазерного импульса с длиной волны 1064 нм обеспечивает ему уникальную безболезненность. Однако некоторое накопление тепла будет ощущаться, особенно при использовании более высоких плотностей потока с объективом 2 мм.

ЭТО БОЛЬНО?

Возникает легкое ощущение тепла, которое вполне терпимо. При использовании более высоких значений плотности потока с объективом 2 мм может возникнуть легкое пощипывание. Это одно из ключевых технических достижений технологии Aerolase!

Aerolase Neo установил новый стандарт практически безболезненного лечения даже на более темных типах кожи благодаря технологии MicroPulse-1064. Данное уникальное преимущество экономит время, затраты и устраняет хлопоты, связанные с гелями и спреями, необходимыми для других лазеров, которые охлаждают кожу во время лечения.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ БОРОДАВОК? ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ БОРОДАВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

Бородавка — это тип кожного нароста, вызванного вирусной инфекцией кожи, обычно встречается на пальцах и вокруг ногтей, а также на подошвах стоп. Обычно он попадает в организм через поврежденную кожу, что может вызвать быстрый рост над кожей или даже медленный рост под кожей, как это часто бывает с подошвенными бородавками.

КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК?

Обычно Aerolase Neo использует объектив 2 мм для удаления бородавок благодаря высокой плотности потока, необходимой для эффективного разрушения сосудистой сети под кожей. Обычно для небольших бородавок требуется большая мощность, а для удаления более крупных бородавок требуется более низкая плотность потока. При обработке поражений распорные стержни должны слегка касаться кожи, не оказывая слишком большого давления.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ?

Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли для более темных типов кожи или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая по существу устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентов с типами кожи IV-VI следует лечить очень осторожно, особенно в области лица, так как для них присутствует повышенный риск гипер- и/или гипопигментации.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ВЫПУКЛЫХ БОРОДАВКАХ ИЛИ КОЖНЫХ НАРОСТАХ?

Если вы не уверены в том, что структура является бородавкой или кожным наростом, рекомендуется, чтобы дерматолог сначала проверил выпуклую структуру перед началом любого вида лечения. Если дерматолог одобрит лечение пациента, вы можете приступить к процедурам. Кожные наросты лечатся с теми же настройками, что и бородавки, поскольку в обоих случаях целью является коагуляция сосудистой сети, питающей поражение.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР?

Выпуклые бородавки могут потемнеть после лечения, но бородавки, которые находятся под кожей, могут не показывать никаких немедленных видимых изменений. Если сосудистая сеть была успешно устранена, бородавка медленно спадает и покрывается струпьями, в конечном итоге отшелушиваясь в течение нескольких недель.

ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ БОРОДАВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

После того, как питающая бородавку сосудистая сеть будет разрушена, вполне вероятно, что она исчезнет навсегда. Однако важно отметить, что вирус все еще останется в кровотоке, и новые бородавки могут образоваться в любое время.