

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ):

- Пациенты с солнечными ожогами или раздражением кожи в местах лечения
- Пациенты с неустановленными заболеваниями кожи в местах лечения
- Пациенты с плохо заживающей кожей после других видов лазерной терапии
- Пациенты, склонные к изменению цвета кожи
- Пациенты, принимающие фотосенсибилизирующие препараты, такие как Аккутан, должны рассмотреть возможность прекращения приема препарата за 6 месяцев до лечения
- Пациенты, принимающие Ретин-А местного применения, должны выждать 2 недели перед лечением
- Не направляйте лазерное излучение на любые выпуклые поражения, за исключением истинно красных, т.е. ангиом; другие поражения должны быть сначала осмотрены дерматологом
- Пациенты с солнечными ожогами должны подождать до заживления ожога. Лазерная терапия может активировать губной герпес (волдыри), особенно на верхней губе, а пациентам со склонностью к появлению волдырей на губах можно начать принимать противовирусные препараты перед лечением.

СКОЛЬКО СЕАНСОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ?

Пациентам рекомендуется пройти не менее 3–6 процедур. Как правило, чем более хроническим или тяжелым является состояние, тем больше времени требуется организму для реагирования. Большинство состояний, подлежащих лечению, требуют от одного до нескольких сеансов. Количество необходимых процедур зависит от тяжести состояния и длительности его течения. Для некоторых состояний может потребоваться несколько процедур в неделю для эффективного и достаточного заживления.

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ?

Рекомендуется проводить процедуры 1–2 раза в неделю.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ МНОГОКРАТНЫЕ ПРОХОДЫ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬ ИМПУЛЬСЫ НА ОДНУ И ТУ ЖЕ ОБЛАСТЬ?

Обычно рекомендуется применять несколько проходов на пораженной области для достаточного нагрева тканей с целью оптимизации иммунной реакции и эффективного запуска каскада заживления.

ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ

Некоторые пациенты могут реагировать не так, как другие. Обычно при купировании боли результаты должны быть заметны сразу после лечения, но могут занять больше времени в зависимости от тяжести состояния и того, является ли состояние хроническим или острым. Заживление ран – это более медленный процесс, который может потребовать нескольких процедур до появления видимых результатов и закрытия ран, что также будет зависеть от тяжести, глубины и размера раны, а также от способности иммунной системы пациента к заживлению. Процесс заживления у каждого человека, известный как каскад заживления, различен, и поэтому время между лечением воспаления, регенерацией тканей и ремоделированием тканей может сильно различаться у разных пациентов, но лазерная терапия может помочь ускорить эти процессы.

ЭТО БОЛЬНО?

Лазерная терапия абсолютно безболезненна для большинства пациентов. Небольшой процент пациентов сообщают о покалывании в области обработки. У некоторых пациентов присутствует легкое ощущение тепла. Однако большинство пациентов ничего не чувствуют во время лечения.

КАК ЛАЗЕРЫ ПОМОГАЮТ В ЗАЖИВЛЕНИИ РАН И КУПИРОВАНИИ БОЛИ?

Лазерная терапия Aerolase Neo стимулирует естественную реакцию организма на заживление, оказывая благотворное воздействие. Лазеры подают световые импульсы, которые глубоко проникают в кожу и окружающие ткани и они оптимизируют иммунные реакции крови. Эффекты являются как противовоспалительными, так и иммунодепрессивными после запуска каскада заживления.

КАКОЙ РАЗМЕР ПЯТНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН И КУПИРОВАНИЯ БОЛИ?

Рекомендуется использовать объектив 6 мм. Для стимулирования эффективного заживления Aerolase Neo обычно использует более низкую плотность потока и больший размер пятна из-за имеющейся глубины и с целью формирования мягких импульсов, необходимых для эффективной стимуляции заживления.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ НА ТЕМНОЙ КОЖЕ?

Aerolase Neo является самым безопасным лазером в отрасли для более темных типов кожи или загорелой кожи. Это стало возможным благодаря технологии MicroPulse-1064, которая по существу устраняет боль при лечении, сводя к минимуму вероятность гипер- и/или гипопигментации. Пациентов с типами кожи IV-VI следует лечить очень осторожно, особенно в области лица, так как для них присутствует повышенный риск гипер- и/или гипопигментации.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР И КАК СКОРО МОЖНО ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ?

Сразу после процедуры рану следует закрыть соответствующей повязкой. Заметите ли вы немедленное улучшение или нет, – зависит от типа заболевания и его длительности.

КАК СКОРО МОЖНО ОЖИДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ?

Как правило, чем более хроническим или тяжелым является состояние, тем больше времени может потребоваться организму для реагирования. Лечение может варьироваться от однократной процедуры до многократных сеансов для достижения желаемых результатов. Количество необходимых процедур зависит от тяжести состояния и длительности его течения. Есть некоторые состояния, которые невозможно полностью вылечить, но их можно облегчить, улучшить и поддерживать с помощью лазерной терапии. Если ваше состояние не изменится сразу же, может потребоваться 3-4 сеанса, прежде чем изменения будут заметны.